

LE CIMENT COMPOSITE POUR  
**TOUTES** LES RESTAURATIONS  
INDIRECTES



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT –  
**VISALYS® CEMCORE**

**COMPOSITE DE SCÈLEMENT ET DE RECONSTITUTION  
CORONO-RADICULAIRE À POLYMÉRISATION DUALE**



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

# VISALYS® CEMCORE – CONVAINCANT À 100%

## POUR TOUTES LES INDICATIONS

- **Pour la Cimentation définitive de** Couronnes, Bridges, Inlays, Onlays, Facettes, Bridges Maryland, Tenons Radiculaires ou la Reconstitution de moignons
- **Parfaite adhésion sur tous les matériaux de restauration:** métaux (nobles), céramique oxydée (oxyde de zirconium et d'aluminium), céramique de silicate (felspathique et vitrocéramique), céramique hybride et composite

### Observations cliniques par le Dr Marc Apap

Trois cas cliniques ont servi d'exemples pour démontrer l'adhésion réussie en toute simplicité de restaurations indirectes



Et voici la publication dans son intégralité

## PARFAITE STABILITÉ DES TEINTES

Visalys® CemCore est hydrophobe, contrairement aux autres composites de collage, cela minimise l'absorption des colorants et la décoloration du joint-ciment.



	RelyX™ Universal	RelyX™ Unicem	RelyX™ Ultimate	Panavia™ F2.0	Panavia™ V5	Multilink® Automix	Variolink® Esthetic DC	Visalys® CemCore
Eau								
Café								
Vin rouge								

Stabilité des teintes après immersion pendant 48H à 37°C

# LIAISON SÛRE ET DURABLE



La **haute qualité de l'écart marginal** de **Visalys® CemCore** est synonyme d'une parfaite liaison entre composite et substance dentaire dure.

Source: Prof. Dr. Roland Frankenberger (2019), *Marginal Quality of Ceramic Inlays luted with Visalys® CemCore*, Université de Marburg



Même après une simulation de la mastication de **10 Années** pas de décollement pas de fracture.

Source: Prof. Dr. Dipl.-Ing. Martin Rosentritt (2020), *Fracture force after long-term storage and TCML*, Université de Ratisbonne



# MISE EN ŒUVRE INTELLIGENTE

Toujours la même façon de procéder quelque soit le type de restauration indirecte



2)



**Elimination facile de l'excédent**

1) Excellents résultats d'adhérence grâce à la technologie brevetée Active Connect.  
Plus d'informations sur [www.kettenbach-dental.de/act](http://www.kettenbach-dental.de/act)

2) Source: Dr. med. dent. Frank-Michael Maier



**Regarder maintenant le collage de 16 facettes**

# VISALYS® CEMCORE – LA GAMME

## Visalys® CemCore

### Starter pack

Seringue d'automélange de 4.5gr (2.5ml),  
2ml de Tooth Primer, 2ml de restorative primer,  
embouts mélangeurs bleus, arrondis/pointus/  
5 unités, 3 embouts intra-oraux, 2 embouts endo

Universal (A2/A3)

REF 13570

### Normal pack

Seringue d'automélange de 9gr (5ml),  
embouts mélangeurs bleus, arrondis/pointus/  
10 unités, 6 embouts intra-oraux, 4 embouts endo

Universal (A2/A3)

Opaque

REF 13572

REF 13573

Translucent

REF 13574

Bleach

REF 13575

Dark (A4)

REF 13576

### Visalys® Tooth Primer

Flacon de 4ml

REF 13580

### Visalys® Restorative Primer

Flacon de 4ml

REF 13581



Made  
in  
Germany

Kettenbach SNC  
7, Place de la Gare  
57200 Sarreguemines · France  
Tél. : +33 3 87 28 86 17  
Mobile: +33 6 43 27 82 04  
contact-fr@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.fr



0310556\_3425

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent